



GlucoQuick[®] Sistema de Monitoreo de Diabetes

Guía Rápida de Conexión del Dispositivo

www.diabetrics.co

Línea de atención al cliente: 01 - 8000 – 510 361

Fecha	Versión	Descripción	Editor
2013/04/23	V1.0	Primera Versión	POSPINO
2014/10/20	V1.0.1	Actualización línea de atención al cliente.	POSPINO



CONECTAR SU DISPOSITIVO AL PC

Antes de descargar la información histórica de su dispositivo a su computador o antes de realizar la configuración del mismo, usted tiene que conectar el dispositivo al PC siguiendo los siguientes pasos:



Imagen 1: Terminaciones del cable

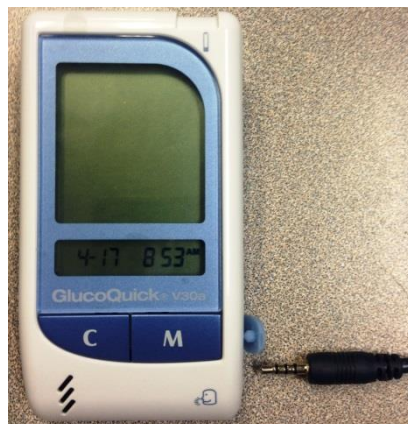


Imagen 2: Imagen de referencia (Glucómetro V30a)

- Cuando el dispositivo se encuentre apagado, conecte la terminación correspondiente del cable a la interfaz del dispositivo (la ubicación puede variar según el dispositivo).
- Conecte la terminación correspondiente del cable al puerto USB de su PC.
- “PC” or “PCL” aparecera en el dispositivo de glucosa en sangre o en el dispositivo de glucosa en sangre y presión arterial, respectivamente. La comunicación entre el dispositivo y el PC está lista.
- Abra el programa para iniciar la descarga de datos o la parametrización del dispositivo.