


GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes

Guía Rápida de Instalación

Fecha	Versión	Descripción	Editor
2013/04/25	V1.0	Primera Versión	POSPINO
2014/10/20	V1.0.1	Actualización línea de atención al cliente.	POSPINO

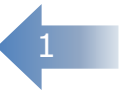

ANTES DE INSTALAR

Antes de iniciar la instalación, por favor verifique que su computador cumpla los requisitos del sistema. Después, decida cuál de las versiones de GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes desea instalar.

Requerimientos del Sistema

Su computador debe cumplir ciertos requerimientos mínimos para asegurarse que GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes no tendrá problemas durante su uso.

Hardware

La siguiente configuración de hardware es la mínima requerida para el uso de GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes:

Componente	Requerido(mínimo)	Recomendado
Computador	Computador compatible con IBM	
Procesador	400 Mega Hertz (MHz)	Mas alto
RAM	64 MB	Se recomienda mayor cantidad
Espacio en disco duro	75 MB disponible	
Tarjeta de Gráficos	1024 x 768	Mayor Resolución
Interfaz para descarga de datos	Cable de conexión RS232/USB	Cable de conexión RS232/USB

Componente	Requerido(mínimo)	Recomendado
Impresora	Cualquier impresora que pueda ser instalada en Windows (necesaria si se desea imprimir reportes)	Impresora a color


Nota:

Este cable debe ser obtenido de forma separada. Contáctese a un representante de servicio al cliente GlucoQuick® o remítase al sitio web www.diabetrics.co

Software/Sistema Operativo

GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes es una aplicación 32-bit el cual no es compatible con todos los sistemas operativos para computadoras. GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes está disponible para los siguientes sistemas operativos:

Sistema Operativo
Microsoft® Windows XP
Microsoft® Windows Vista versión 32-bit
Microsoft® Windows 7 versión 32-bit

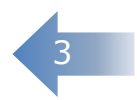

INSTALANDO EL SOFTWARE

El Circulo de la Vida tiene disponible para su descarga gratuita GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes

Dirección de descarga: <http://www.circulodelavida.co/descarga.aspx>

Para instalar GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes siga los siguientes pasos:

- ✎ Encienda su computador.
- ✎ Cierre cualquier programa que se estén ejecutando, especialmente protectores de pantalla y programas de antivirus, que, pueden causar problemas al momento de la instalación.
- ✎ Ejecute el archivo descargado, para iniciar la extracción e instalación.
- ✎ Es necesario leer y aceptar los términos de licencia para el componente “.Net Framework 3.5”, si desea instalar el software, por favor acepte los términos del contrato de licencia haciendo clic en el botón “Aceptar”.

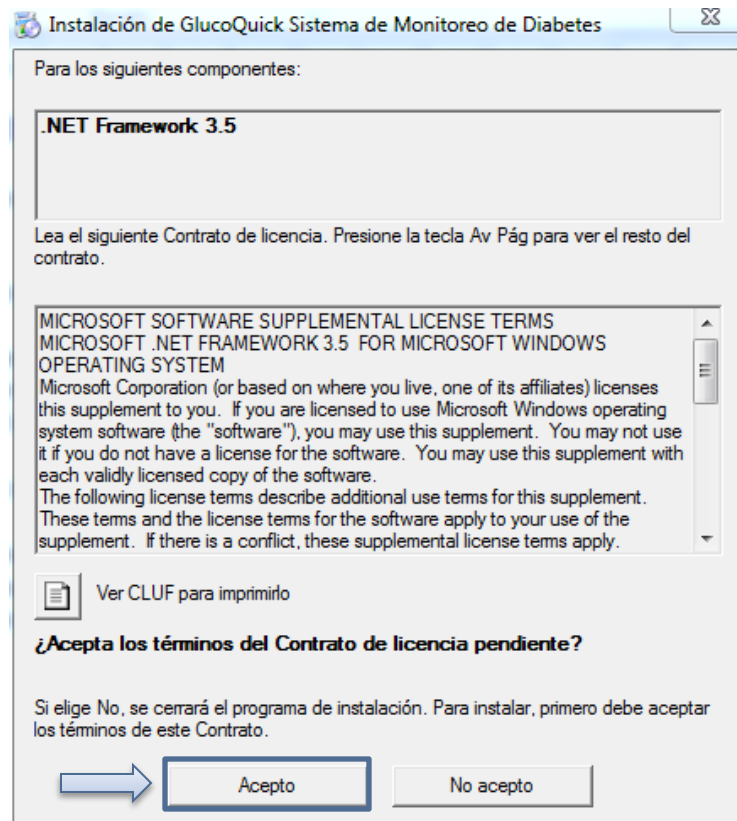


Imagen 1: Acuerdos de licencia .Net Framework 3.5

- En algunos caso es necesario instalar el software “Crystal Reports for .NET Framework 2.0”, si es así, aparecerá una ventana para la instalación del mismo, por favor, para instalar, acepte la licencia haciendo clic en el botón “Aceptar”.

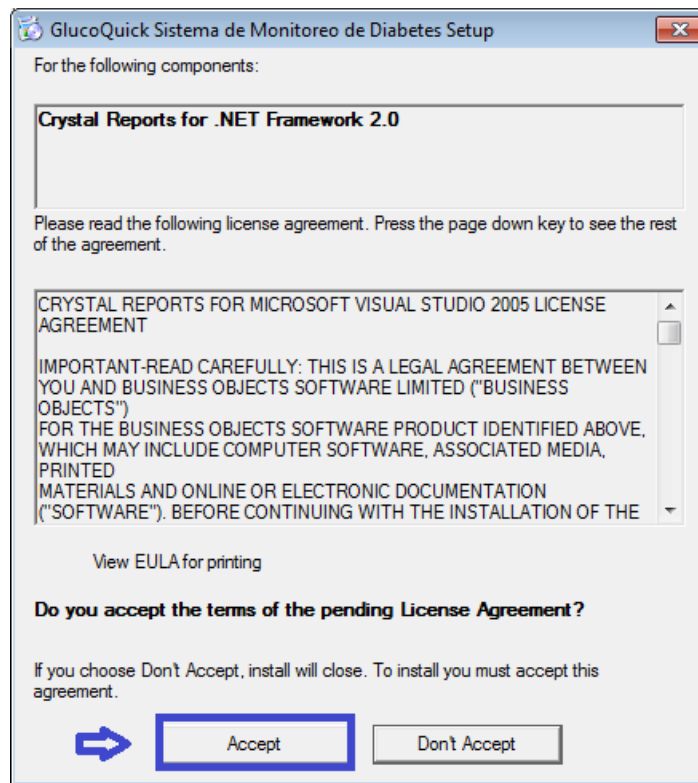


Imagen 2: Instalación de Crystal Reports

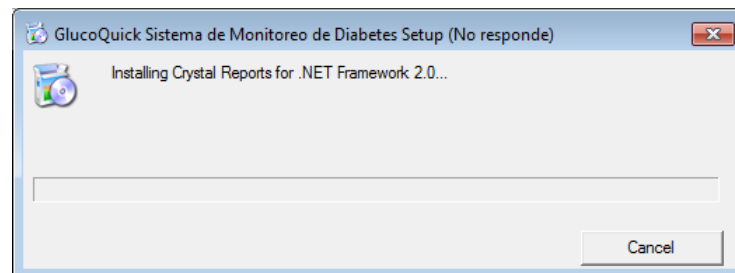


Imagen 3: Proceso de instalación

- Después de la instalación de Crystal Reports, el asistente de instalación de GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes lo guiará durante la instalación. Haga clic en "Siguiente" para continuar con la instalación. Si hace clic en "Cancelar", no terminará la instalación.

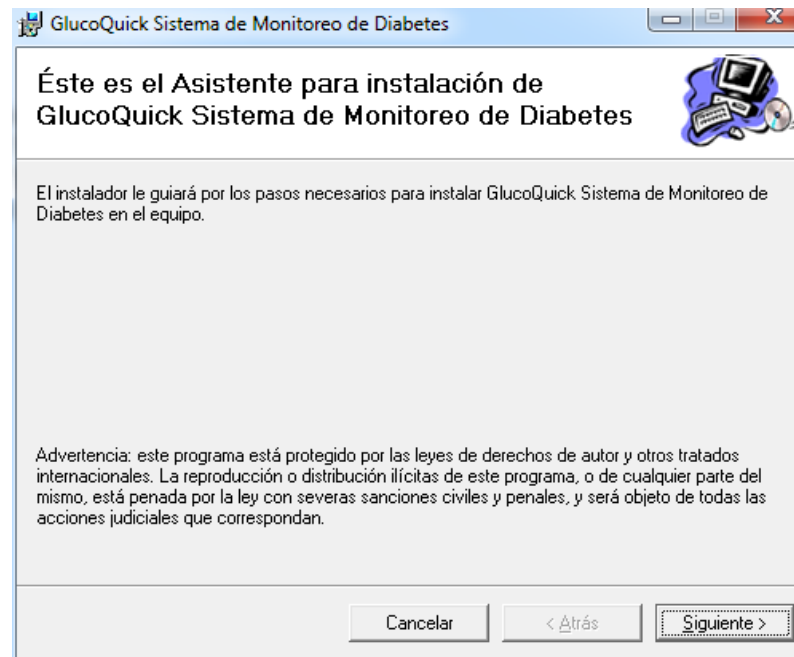


Imagen 4: Inicio de Instalación

- La Ventana "Seleccionar carpeta de instalación" se mostrará. Acepte la ruta de destino sugerida o haga clic en "Examinar" para especificar otra ruta. Seleccione "Para todos los usuarios" para permitir a todos los usuarios del equipo utilizar el software; seleccione "Solo para este usuario" si prefiere que solo el usuario

actual sea el unico que pueda ejecutar el software. A continuacion presione el boton " Siguiente".

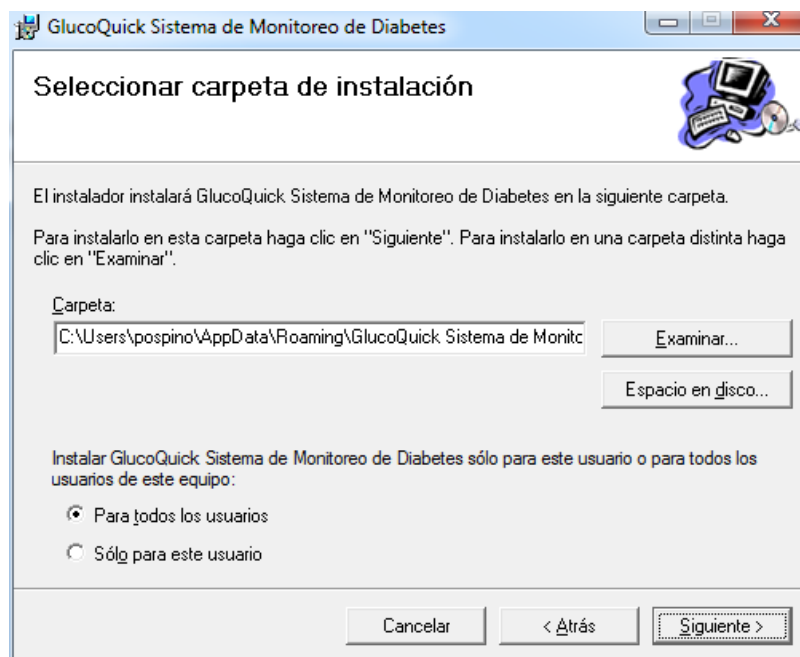


Imagen 5: Carpeta de instalación y uso del software

- A continuación se mostrara la ventana de "Confirmar instalación". Presione el boton "Siguiente" para iniciar la instalación.

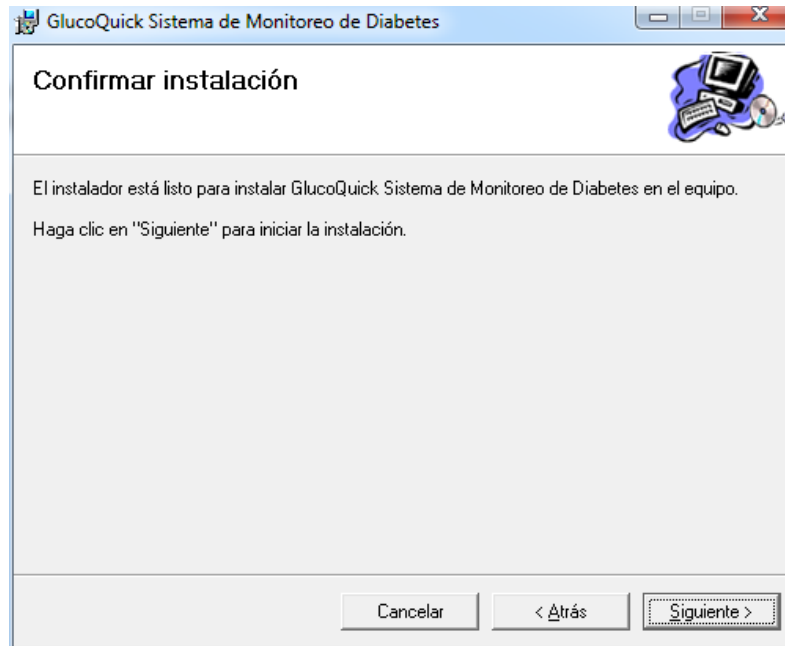


Imagen 6: Dialogo de confirmación de instalación

- Una vez se completa la instalación, la ventana "Instalación Completada" se lo informara. Presione el boton "Cerrar" para terminar con la instalación.

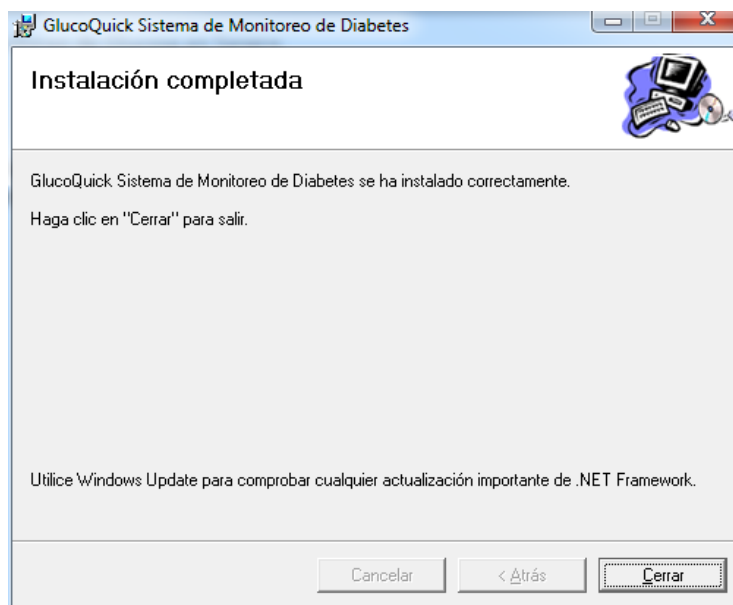


Imagen 7: Instalación completa

Ahora el icono GlucoQuick® Sistema de Monitoreo de Diabetes aparecera en su escritorio, y "GlucoQuick Sistema de Monitoreo de Diabetes" sera añadido a su lista de programas.



Imagen 8: Icono del software

Removiendo el Software

➤ Haga click en Inicio -> Panel de Control. Aparecera la ventana de Panel de Control. Haga click en el icono de "Desinstalar un programa".

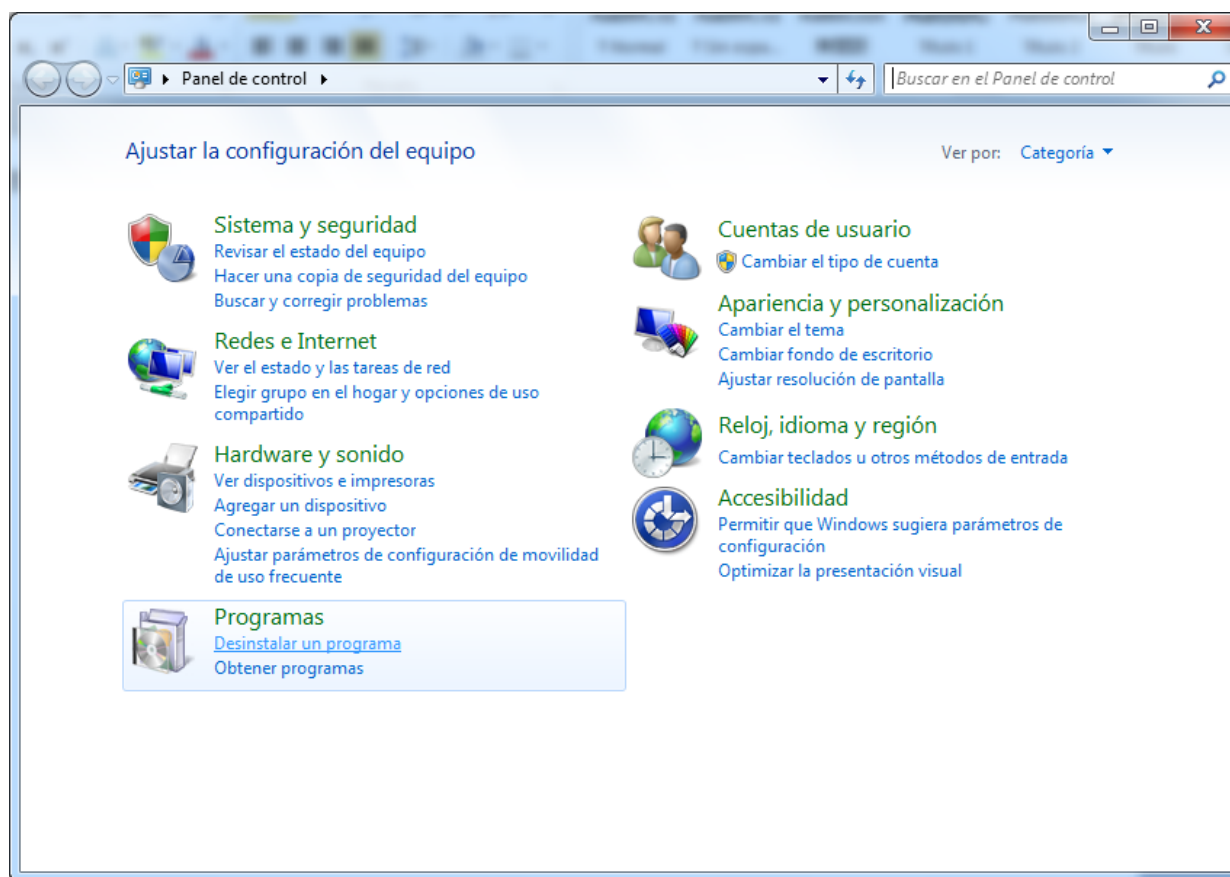


Imagen 9: Panel de control de Windows

- La pantalla de "Desinstalar o cambiar un programa" se mostrara. Seleccione "GlucoQuick Sistema de Monitoreo de Diabetes" y presione el boton "Desinstalar" para desinstalar.

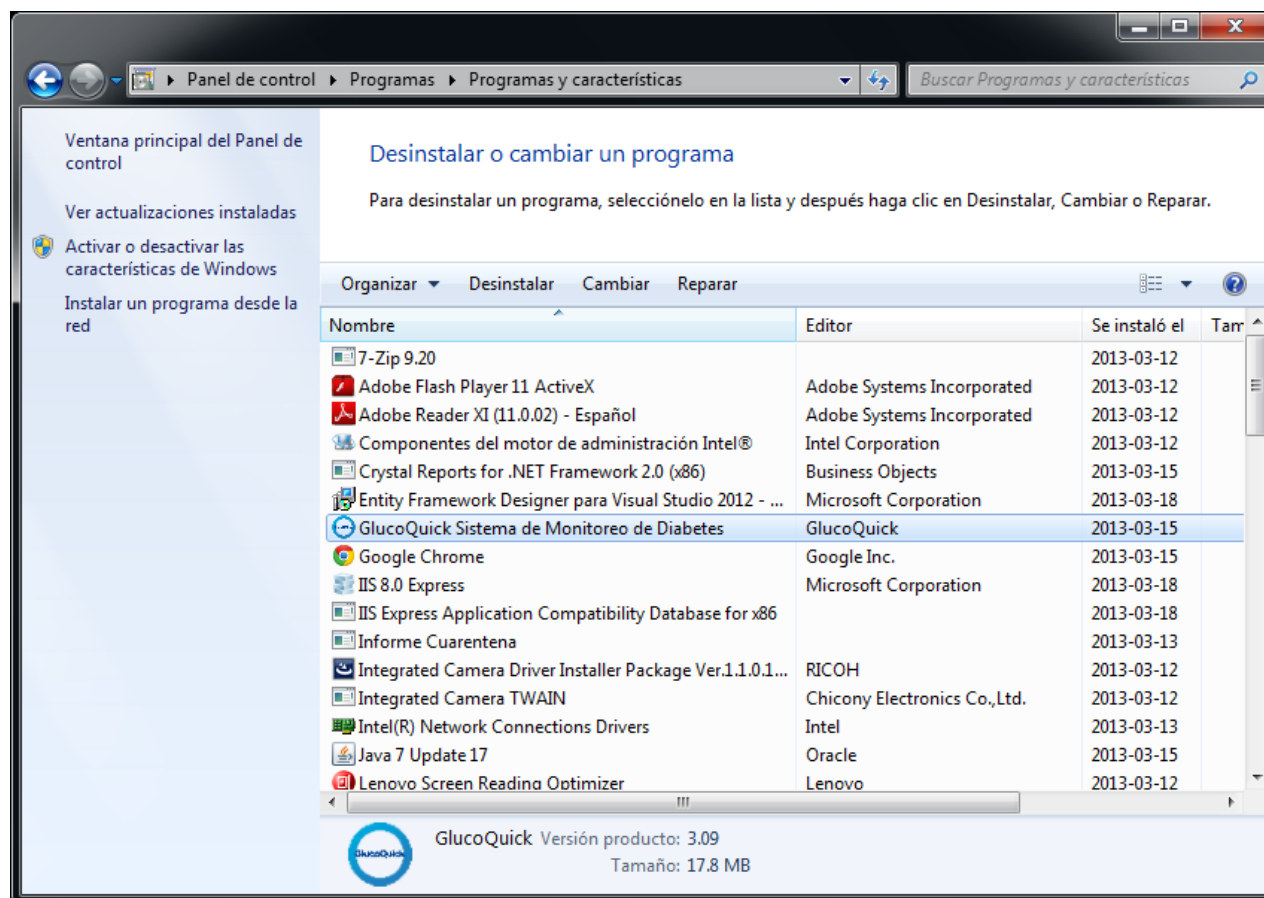


Imagen 10: Ventana de Programas y características

Un dialogo de confirmacion le preguntara si esta seguro de la operaci3n que va a realizar. Presione "Si" para desinstalar el software.

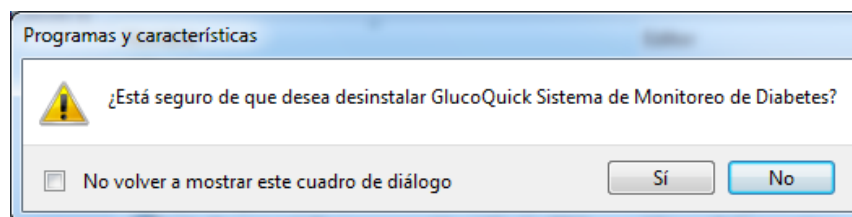


Imagen 11: Dialogo de confirmaci3n para desinstalaci3n

➤ Despues de desinstalar "GlucoQuick Sistema de Monitoreo de Diabetes", sugerimos que "Crystal Reports for .NET Framework 2.0 (x86)" tambien sea desinstalado de su PC. Este programa se instalo con "GlucoQuick Sistema de Monitoreo de Diabetes". Presione "Quitar" para borrar esta aplicaci3n de su PC.

Nota:

Si desinstala GlucoQuick Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre de su PC, todos los datos almacenado seran borrados permanentemente de su equipo.